


GPS PLANNING SOFTWARE

- LINK PARA REGISTRO INICIAL DO CIRURGIÃO: <https://gpsweb.blue-ortho.com/register>
- LOCAL REP – COLOCAR NOME DA EMPRESA = CARE MED
- APÓS O REGISTRO INICIAL, AGUARDE AO MENOS 48 HORAS PARA NOVO ACESSO. SE NÃO TIVER ACESSO APÓS ESTE PRAZO, AVISE O SEU REPRESENTANTE!
- UMA VEZ REGISTRADO, ACESSE POR ESTE LINK: <https://gpsweb.blue-ortho.com/>
- FAZER O LOG IN COM A SENHA REDEFINIDA
- BAIXAR O PLANNING SOFTWARE PARA WINDOWS OU MAC, SEGUINDO O PASSO A PASSO:

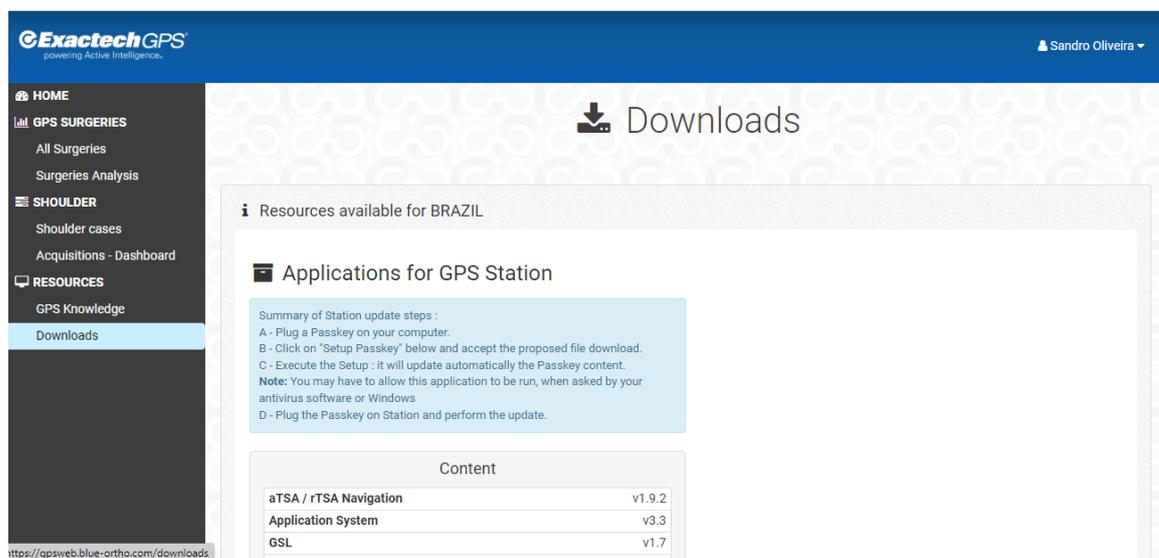

ExactechGPS powering Active Intelligence. Sandro Oliveira

Downloads

Resources available for BRAZIL

Applications for GPS Station

Summary of Station update steps :

A - Plug a Passkey on your computer.
B - Click on "Setup Passkey" below and accept the proposed file download.
C - Execute the Setup : it will update automatically the Passkey content.
Note: You may have to allow this application to be run, when asked by your antivirus software or Windows
D - Plug the Passkey on Station and perform the update.

| Content | |
|------------------------|--------|
| aTSA / rTSA Navigation | v1.9.2 |
| Application System | v3.3 |
| GSL | v1.7 |

Applications for Desktop

Click on desired Software and accept download to install it on your computer.

Content

| | |
|---|--------|
| aTSA / rTSA Planning | v1.9.3 |
|   Equinox Planning App - Windows - v1.9.3 | |
|   Equinox Planning App - Mac OS - v1.9.3 | |

- APÓS ACESSAR, HÁ 2 OPÇÕES NO PROGRAMA: PLANNING APP E OU PLANNING APP COM GPS
- NA OPÇÃO *PLANNING APP* PODEMOS REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CIRURGIA 3D IMEDIATAMENTE. NA OPÇÃO *PLANNING APP COM GPS*, AS IMAGENS SERÃO ENVIADAS PARA A BLUE ORTHO, QUE EM ATÉ 3 DIAS RETORNA COM UM PLANEJAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR O GPS.