

PEDIÁTRICAS

SISTEMA DE PLACAS 4.0 E 5.5mm

- Osteotomia varizante / valgizante, de rotação do fêmur proximal pediátrico.
- Trauma em pacientes pediátricos.
- Placa de 4.0mm para crianças até 35kg. (por volta de 2 a 8 anos)
- Placa de 5.5mm para crianças até 55kg. (por volta de 8 a 16 anos)



Placa 150°



Placa 120°




Placa 100°



PLACAS BLOQUEADAS 4.0mm | 5.5mm



STEP BY STEP

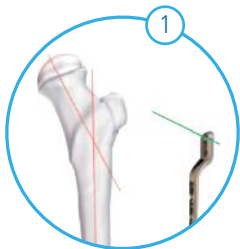


1 Definir a correção através do ângulo CCD

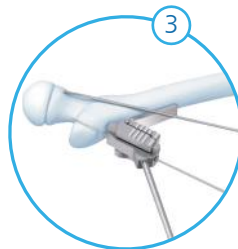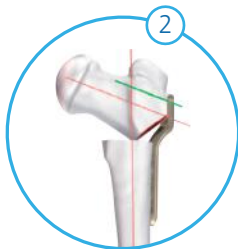


3 Utilizar o posicionador de acordo com o tamanho da placa para realizar a inserção dos fios




4 Após inserção dos fios realizar a marcação para osteotomia e o controle rotacional

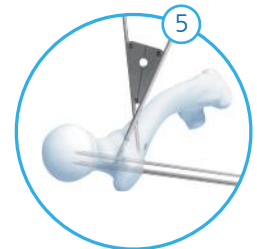



6 Realizar a osteotomia

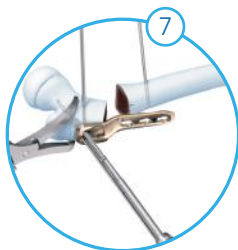

7 Fixar a parte proximal

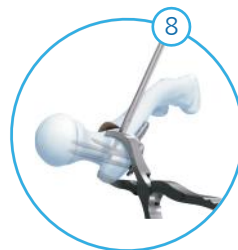

8 Após fixação proximal, fixar diáfise

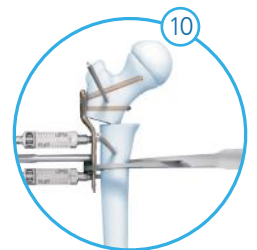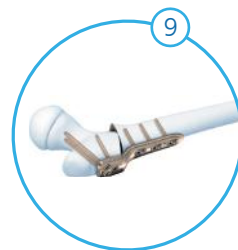

10 Utilizar instrumental medializador se necessário

Reg. ANVISA: 80082910145, 80082910117